

Hubsäulenliege



Bezugsfarben





Die Hubsäulenliege hat ein Schlichtes Design und eine große Beinfreiheit.

Technische Details:

Polsterteilung: 2-geteilt

Polstermaße: 200 x 65 cm

Elektrische Höhenverstellung: serienmäßig mittels Handschalter von ca. 50 - 90 cm

Polsterstärke: 60 mm (20 mm Holz + 40 mm Schaum)

Kopfteil: serienmäßig ohne Teilung, inklusive Nasenschlitz

Länge Kopfteil: 50 cm

Kopfteilverstellung: positiv ca. 40° und negativ ca. 45°

Belastbarkeit: bis 180 kg Patientengewicht

Gestell: kunststoffbeschichtet in RAL 9016 - weiß (alle RAL Farben optional möglich)

Geschwindigkeit Höhenverstellung: 22/40 Sekunden von unten nach oben (ohne Belastung/ in Vollast),

Bezugsfarbe: Frei nach Farbkarte Wählbar

Hergestellt nach den neuen Erkenntnissen aus dem Markt, im Sinne der integrierten Sicherheit.

Die Betätigung der elektrischen Höhenverstellung erfolgt durch eine Doppel-Tipp-Betätigung des Bedienelements (Hand,- Fuß,- oder Rundumschalter) um eine unbeabsichtigte bzw. unautorisierte Verstellung zu verhindern. Zur Höhenverstellung muss die gleiche Richtungstaste am entsprechenden Bedienelement 2x kurz hintereinander betätigt werden. Nach der zweiten Betätigung ist der Antrieb freigeschaltet. Mit der dritten Betätigung kann die Liegenfläche angehoben oder gesenkt werden. Bei Betätigung in die entsprechende Richtung fährt der Antrieb solange wie der Schalter oder der Rundumschalter gedrückt bleibt. Durch Loslassen der Taste wird der Verstellvorgang sofort unterbrochen. Beim Rundumschalter erfolgt die Fahrtrichtung in umgekehrter Logik, d.h. die Liege fährt nach oben, wenn das Gestänge nach unten gedrückt wird und anders herum.

Ist die Höhenverstellung beendet, kann innerhalb von 8 Sekunden eine Korrektur erfolgen, bevor die Liege sich automatisch abschaltet. Dauert die Unterbrechung länger als 8 Sekunden, müssen Sie die Doppel-Tipp-Betätigung erneut ausführen.

Das Freischalten und Sperren wird über ein kurzes akustisches Signal (Piepton) angezeigt.



Länge Netzkabel: ca. 3,5 Meter

Alle Liegen können individuell im Baukastensystem nach Ihren Wünschen hergestellt werden.

Lieferzeit: 6 Wochen

Gewicht der Liege: 95 kg